

ジンジウェット GingiWet

正しい補綴装置は正しい印象採得から
精密な印象採得の為に是非ご使用ください！

連合印象(寒天印象材・アルギン酸印象材)の使用前に用いる事によって、表面張力が印象材の流れを改善し、狙った部分まで正確に寒天を届けます。気泡の無い強い印象の採得ができます！



12本入り
1,800円(税別)



ジンジウェットを使うと



流れが良くなり
気泡が入りにくくなります。

本材は歯科用寒天印象材を注入する前に使用する液体です。

寒天印象材カートリッジ用のシリンジを使用
弊社Pカートリッジシリンジ・Mカートリッジシリンジを推奨

【なぜジンジウェットが必要なのか?】

正しい連合印象の為には、寒天とアルギン酸の硬化を合わせるのが必須となります。その為には、相当量の寒天印象材の使用が不可欠となります。その際の寒天印象材の流動性を改善し、狙った部位に流し込むために必要となります!

【使用方法】

本材は室温のまま使用できます。

- ① 使用前に本材カートリッジを軽く振る。
- ② 本材カートリッジを寒天印象材カートリッジ用シリンジにセットする。
- ③ 少量を口腔外で押し出し、出る量を確認する。
- ④ 印象採得を行う歯牙及びその周辺に適量※1の本材を注入塗布する。
※1寒天印象材で十分置き換えられる少量
- ⑤ 直ちに印象材の操作方法に従って印象採得を行う。

寒天アルギン酸連合印象のNEWスタンダード材料

ジンジウェット GingiWet