

歯科印象採得用器材
リテンションワイヤー


ポストピン

ポスト印象用補強ピン



¥3,200 (税別)

ポスト印象時の補強にご使用頂けます。

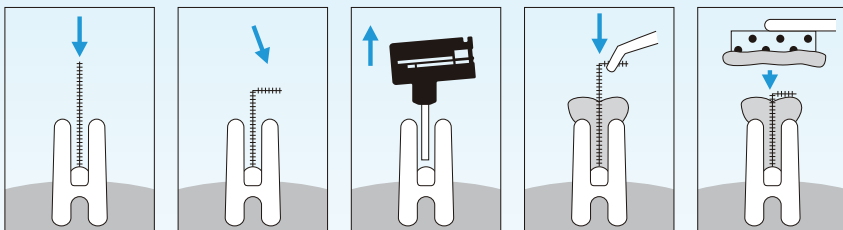

適した太さのピンを孔の深さより長めにカットします。

印象材からのピンの抜けを防ぐため先端を直角に曲げます。

シリンジの針を孔の奥まで入れ、寒天印象材を注入します。

ピンをポスト孔にゆっくりと挿入します。

アルジネートを盛ったトレイを圧接し硬化を待ちます。

- ステンレス線にレーヨン繊維を静電植毛しました。
- 植毛の長さは各色共0.5mmです。
- 長さは150mm、22本入りです。
- ポスト孔の径に合わせ3種類の太さをご用意しています。
- 各色の径は、ワイヤーの径です。

医療機器届出番号 11B2X00019CL1006

種類	ワイヤーの径	ワイヤーの長さ	植毛の長さ	入数
■ 赤(細)	0.20φ	150mm	0.5mm	22本
■ 緑(中)	0.2φ			
■ 黒(太)	0.30φ			
■ 混合	赤8本、緑8本、黒6本			合計:22本

※上記価格は税抜き価格です。
※製品の仕様および価格は予告なしに変更することがあります。

製造販売元(第2種医療機器製造販売業)
製造販売業許可番号: 11B2X00019
Clark 株式会社 クラーク

TEL. 048-994-1825 FAX. 048-994-1827
〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2