


正しい歯磨きのために 歯垢染め出し錠

Plaque Checker プラークチェッカー

磨けているつもりでも磨けていない！
歯の汚れ(歯垢)をピンク色に染め出して
チェックできます！

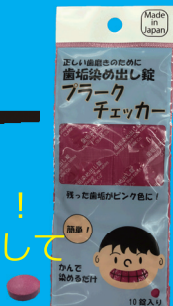

かんで
染めるだけ

簡単 安心

錠剤だからこぼさない
ほのかな甘みでクセがない

Made
in
Japan

歯の汚れ(歯垢)を見える化して正しい歯磨きを!

ご使用方法

- ① 錠剤を口に入れて細かくかみ碎きます。
- ② 舌を使って歯の表面に塗ります。
- ③ 一度軽く口をすすいでください。
- ④ 歯垢が付着しているほど濃く染まります。
- ⑤ ピンク色に染まった部分を磨き直し、口をすすいで終了です。

※正しい歯垢除去が出来る様に定期的(1週間~1ヶ月)に使用する事をお勧めいたします。

ご注意

- ・ 乳由来・オレンジ由来成分を使用しています。
- ・ 衣服についた場合、水洗いしてください。
- ・ 小さなお子様の手の届かない所へ保管してください。
- ・ 飲み込んででも害はありませんが、意図的に飲み込む事はしないでください。

<成分>

- 乳糖・結晶セルロース・タルク・ステアリン酸マグネシウム
・ サッカリンナトリウム・プロピレングリコール・香料
・ 食用赤色 104号