


歯科材料 06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科用印象採得用器材 70887000

## ポストピン

### 【形状・構造及び原理等】

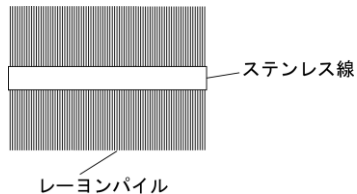

長さ 180mm


製品の種類	製品外径	ステンレス線径
赤	φ 1.3mm ± 0.15	φ 0.2mm
緑	φ 1.4mm ± 0.2	φ 0.25mm
黒	φ 1.5mm ± 0.2	φ 0.3mm

### 【使用目的又は効果】


ポスト印象採得時の印象材補強用として。又、石膏注入時に於けるポストの変形を防ぐため。

### 【使用方法等】


#### 使用方法

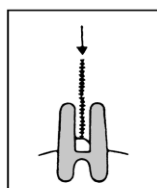


1 ポストの穴の深さを計り少し長めにワイヤーを切ります。

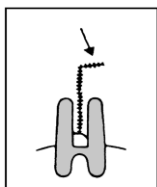


2 ワイヤーの先端を直角に曲げて下さい。その状態でポストから取り出します。

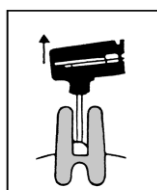

3 ポストの穴にシリンジの針を奥まで挿入し寒天を出しながら静かに抜いて寒天を注入します。

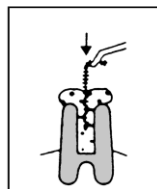

4 2で準備したコロイドピンを静かに挿入して下さい。

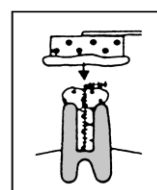

5 その上へ、アルジネットを盛ったトレーを静かに圧接して下さい。

### 【使用上の注意】

本材は、印象採得補助用以外に使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【貯蔵・保管方法】

- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所及びガスの発生の可能性のあるところを避け保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 クラーク  
及び製造業者  
住所 〒340-0832  
埼玉県八潮市柳之宮屋敷通 223 番地 2  
電話番号 048-994-1825